



Es

Alarma inalámbrica para enuresis nocturna

Información del producto

Manual de uso

Garantía



Gracias por elegir la alarma inalámbrica para enuresis Rodger

Le rogamos que lea y siga todas las instrucciones antes de usar la alarma de enuresis.

1. El sistema de enuresis Rodger es adecuado para niños mayores de 5 años.
2. Al comenzar la terapia, manténgase motivado, relajado y confiado.
3. Realice detenidamente una prueba de alarma para que usted y su hijo se familiaricen con el funcionamiento y el sonido de la alarma de enuresis. Repetir esto las primeras noches de uso antes de que su hijo se vaya a dormir aumenta considerablemente el éxito.
4. Debe tener claro que reñir al niño o amenazar con castigos solo causarán estrés y es contraproducente.
5. Coloque la alarma de enuresis a cierta distancia de la cama, de modo que su hijo tenga que levantarse de la cama para apagar la alarma.
6. Premiar a su hijo con una recompensa ocasional, puede motivar y ayudar al niño. Un pequeño regalo es un buen refuerzo positivo de que su hijo lo está haciendo bien.
7. Use el sistema de enuresis Rodger todas las noches hasta que el niño no vuelva a mojar la cama, como mínimo 14 noches consecutivas.
8. Tenga en cuenta que el tratamiento exitoso con el sistema de enuresis Rodger tarda desde unas semanas hasta unos pocos meses.
9. Haga todo lo posible para usar la alarma todas las noches sin interrupción.
10. Si la condición de enuresis de su hijo no mejora en 3 meses, visite a su médico para descartar cualquier afección médica.
11. No inicie la terapia si pronto tendrán lugar acontecimientos importantes, es decir, el traslado de la familia, el nacimiento de un hijo o cambio de colegio.
12. No despierte a su hijo por la noche para ir al baño.
13. Nunca castigues a tu hijo; Su hijo no es responsable de accidentes ocasionales.
14. No le prohíba a su hijo beber antes de acostarse. Beber menos no disminuye la probabilidad de mojar la cama. Sin embargo, es preferible que su hijo no beba té o bebidas carbonatadas o chocolate antes de acostarse.
15. En los primeros días del tratamiento, es posible que un niño que duerme mucho no se despierte. Busque otro tono de alarma.
16. Otra buena solución podría ser dormir junto a su hijo y ayudarlo a despertarse tan pronto como suene la alarma, sobre todo los primeros días. Asegúrese de que su hijo detenga la alarma y vaya al baño. Con el tiempo, su hijo "sintonizará" y lo hará de manera más independiente.
17. Si se produce una recaída, otro entrenamiento corto generalmente tendrá éxito. Cuando ya no se utiliza la alarma, se deben retirar las baterías.

Instalación de la alarma de enuresis

- Coloque el enchufe en el receptor.
- Enchufe el receptor a una toma de corriente y enciéndalo presionando el botón LED central (A), que se iluminará en verde.

Emparejamiento del transmisor y el Segundo receptor:

- Enchufe el receptor a una toma de corriente y enciéndalo pulsando el botón LED central (A), que se iluminará en verde.
- Presione los botones -Y + (B+C) simultáneamente durante 3 segundos.
- El botón LED central (A) comenzará a parpadear en verde: en 1 minuto debe conectar los dos pulsadores del transmisor con la tira metálica (F) del receptor. El transmisor y el receptor se emparejan cuando el LED se enciende en verde y el receptor emite un sonido.

Prueba de alarma:

- Asegúrese que el receptor esté encendido y el volumen esté ajustado (**botón + c**)
- Contacte los dos pulsadores del transmisor con la tira metálica (F) del receptor. Esto hará que suene la alarma y el LED (A) comenzará a parpadear en rojo.
- La alarma se puede apagar pulsando el botón LED central (A).

Configuración de los sonidos de alarma:

Selección del sonido de alarma:

Seleccione el sonido de su agrado pulsando el botón (D). El último sonido seleccionado se escuchará cada vez que suene la alarma.

Para probar el sonido, contacte los dos pulsadores del transmisor con la tira metálica (F) del receptor. Esto hará que suene la alarma y el LED (A) comenzará a parpadear en rojo.

Para que cada alarma emita un sonido diferente:

Presione el botón AUTO (E). Con cada alarma se escuchará 1 de los 8 sonidos disponibles.

Gama:

El alcance del receptor y del transmisor en máximo 30 metros (100 pies) al aire libre. Dentro de los edificios, el alcance podría ser inferior a 30 metros (100 pies).

Calendario online

El calendario de éxito en línea es una versión interactiva del calendario estándar y muy motivador durante el entrenamiento con Rodger. Al utilizar el calendario en línea, recibe mensajes informativos sobre el progreso de forma positiva. Después de una noche seca, su hijo puede elegir un juego de su elección como recompensa. Más instrucciones: www.rodger.nl. O enviando un email al info@casaortopedia.es

Cojín vibrador

Para los niños sordos o con problemas de audición, se puede pedir un cojín vibratorio para acoplarlo al sistema de alarma (G). Este accesorio vibratorio también puede ser útil para los niños que necesitan un estímulo adicional para responder al sistema de alarma. El cojín vibrador se puede colocar debajo de la almohada para alertar a su hijo de que está sonando la alarma.



Fundas de colchón



Las fundas del colchón protegen la ropa de cama y mantienen el colchón seco si el niño moja la cama. Es siempre recomendable usar fundas de colchón. Para más información: o a info@casaortopedia.es

Servicio de asistencia técnica

Para más información puede consultar al distribuidor, que tendrá toda la información que necesita.


Como reciclar este producto

El pictograma que se encuentra en la caja y folletos del producto indica que no se debe desechar junto con otros residuos domésticos al final de su vida útil.

Eso ayudará a proteger el ambiente.

Cuidado

Cuando se utilice el enchufe de red como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá seguir siendo fácilmente operable. Atención, debe desechar las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones de reciclaje.

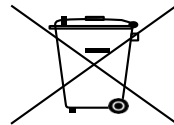

Garantía


¡Atención! la batería correcta es siempre el modelo que recomienda el fabricante, no intente utilizar la alarma con una batería diferente, ya que pone en riesgo la garantía y su seguridad. La alarma Rodger tiene una garantía de un año, a partir de la recepción del dispositivo por parte del comprador, contra defectos de fabricación y contra roturas o faltas en condiciones normales de uso.

Los dispositivos devueltos pasarán un control técnico, y los daños no serán cubiertos por la garantía en el caso de uso incorrecto o de no seguir las instrucciones de este manual.

Esta garantía es válida solo si usted es el comprador original y presenta la factura de compra. La garantía no es válida si las reparaciones del dispositivo son realizadas por terceros. Rodger se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y la garantía sin previo avis

Distribuidor Oficial en España

CasaOrtopedia.es

 604 44 64 64

 info@casaortopedia.es